




LA LETTRE #32

INFORMATION EN CONTACTOLOGIE ●●●●●●●●●● JUILLET 2020

L'ART DE LA PRÉCISION EN LENTILLES DE CONTACT, POUR VOIR LA VIE EN DÉTAIL.

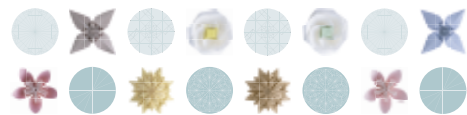

L'origami, nouvelle image du groupe Menicon comme symbole de l'héritage du savoir-faire japonais et de la philosophie de Menicon en lentilles

de contact : sens du détail, approche méthodique et créativité. Il ne s'agit pas seulement de fabriquer des produits, mais aussi d'apporter de la joie et de la beauté aux personnes qui les portent.

Une Vision de Menicon qui prend un sens particulier dans cette période de reprise d'activité.

Toutes les équipes Menicon sont à votre disposition pour vous apporter des solutions dans vos pratiques professionnelles.

Nos programmes de formation en vidéo-conférences sont disponibles sur campusmenicon.fr

Dans le cadre des précautions à prendre par rapport au coronavirus, vous êtes nombreux à nous poser des questions sur la conduite à tenir pour les nouvelles adaptations de lentilles :

- Pour l'entretien des boîtes de lentilles d'essai rigides perméables, l'usage de l'hypochlorite de sodium est recommandé (MeniLAB), de même que le Progent pour les porteurs.
- En lentilles jetables journalières, le concept SMART TOUCH™ dont bénéficient les lentilles Miru 1day Menicon Flat Pack et Miru 1day UpSide facilite l'hygiène de pose sans toucher la face interne de la lentille.
- Pour apprendre la manipulation à un nouveau porteur en évitant tout contact direct, Menicon met à votre disposition des vidéos (passeportlentilles.fr) et guides aux porteurs pour tous les types de lentilles et de port.
- Le contact avec nos responsables régionaux s'organise selon les modalités

qui vous conviennent sur rendez-vous. Nos conseillers techniques et formateurs sont aussi disponibles pour vous accompagner à distance.

Voir la vie en détail avec de nombreuses nouveautés à partager avec vous dans cette lettre :

- Pour les astigmatés, lancement de :
 - **Miru 1day Menicon Flat Pack toric** en lentilles jetables journalières (cf page 6).
 - Nouveau cylindre **-2.25 en Miru 1month toric**.
- Pour les enfants myopes, un avant-goût du concept Menicon Bloom™ déclinant

Menicon Bloom Night™ et Menicon Bloom Day™ bientôt disponibles.

- Pour les porteurs de LRPO, des nouveaux coffrets plus écologiques avec un certificat dématérialisé
- Pour l'entretien des lentilles souples, MENICARE SOFT « made in France » ...

Bonne lecture

Anne Falcotet
Directeur marketing
& Corporate Planning



Miru 1day Menicon Flat Pack

Miru 1day Menicon Flat Pack toric

La gamme Miru 1day Menicon Flat Pack s'agrandit :

NOUVELLE LENTILLE JETABLE JOURNALIÈRE POUR LES ASTIGMATÉS

Page 6

De la correction au contrôle de la myopie :

LE POINT AVEC MENICON

Page 2

La presbytie en lentilles de contact.

UNE DEMANDE DE LENTILLES MULTIFOCALES EN PROGRESSION.

Page 4

MENICARE SOFT :

LA SOLUTION MULTIFONCTIONS POUR TOUTES LES LENTILLES SOUPLES AU NOUVEAU PACKAGING



MADE IN FRANCE

Pages 7-8



DE LA CORRECTION AU CONTRÔLE DE LA MYOPIE : LE POINT AVEC MENICON



L'engagement de Menicon

Le groupe Menicon œuvre depuis plus de 65 ans avec la même philosophie : Sécurité, Qualité & Innovation. De nombreuses études publiées ont démontré le rôle majeur des lentilles de contact (lentilles d'orthokératologie et/ou lentilles souples multifocales) dans la correction et la freinage de la myopie. Menicon s'investit pleinement dans cet axe de développement en distinguant les indications de correction visuelle des traitements de la progression myopique.

Présente sur le marché de la contactologie depuis plusieurs années, **Menicon Z Night**, lentille d'orthokératologie de Menicon, a fait ses preuves cliniques. Destinée à la correction visuelle des myopes et/ou astigmatés, cette lentille est facile à adapter grâce à l'importation des topographies dans le logiciel **easyfit** et l'aide au quotidien des conseillers techniques de Menicon.



Principe de base du remodelage cornéen

Les lentilles d'orthokératologie **Menicon Z Night** sont conçues pour corriger la myopie et/ou l'astigmatisme par le **remodelage cornéen** durant les heures de sommeil (pose des lentilles au coucher et retrait au réveil). Cette technique permet au porteur de pouvoir voir clair et net durant la journée et ce, sans lunettes ni lentilles de correction.


Menicon Z Night pour qui ?

Myopie ≤ -4.00 D
Astigmatisme ≤ -2.50 D
Pour les sportifs, certains métiers comme les pompiers, les coiffeurs, les métiers du BTP, les métiers équestres, les intolérants aux lentilles, en cas de légères sécheresses oculaires, en alternative à la chirurgie réfractive.


En période de COVID-19 :

Dans le contexte actuel, l'orthokératologie apporte une correction pratique avec le port du masque. Portées seulement durant la nuit, il n'y a plus le besoin de porter ni lunettes ni lentilles en journée ! Fini la gêne de la buée sur les lunettes et on s'abstient de se toucher le visage. Mais surtout, on évite de faire tomber ses lunettes lors du retrait du masque, au risque de les abîmer !

Orthokératologie et conseils pour les porteurs

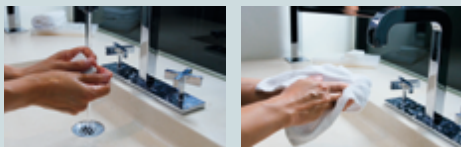

1- Lavage et séchage complet des mains

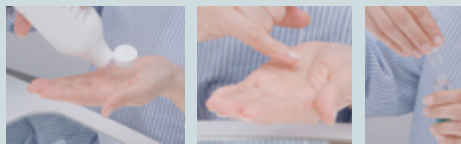

2- Entretien régulier et rigoureux des lentilles : massage soigneux avec du **MeniCare Pure** au quotidien ; déprotéinisation avec **Progent** 1 fois par semaine.



Télécharger le guide porteurs Z Night

<https://bit.ly/37g3oyZ>

ou flashez le QR code pour visionner la vidéo ou :

<https://youtu.be/aFiGkciPoNg>

Voir toutes les vidéos sur

www.passeportlentilles.fr



Se former en Ortho-K avec campusmenicon

Le campus menicon propose tout au long de l'année des sessions de formation et d'information. Une session e-learning est également disponible sur le site campusmenicon.fr, accessible à tout moment sur simple inscription ou connexion. Flashez le QR code à droite pour le visionner ou accédez via le lien : <https://bit.ly/2Ud7RNM>





MENICON BLOOM™ EN AVANT-PREMIÈRE

BIENTÔT DISPONIBLE

2 OPTIONS DE TRAITEMENT POUR LE CONTRÔLE DE LA MYOPIE




Menicon
BLOOM™

Compte tenu de l'incidence croissante de la myopie et de ses conséquences sur la santé dans le monde entier, Menicon Co., Ltd. a consacré d'importantes ressources pour développer des traitements de contrôle de la myopie et introduire progressivement en Europe le concept **Menicon Bloom™**. 2 options de traitement sont proposées pour les enfants dont la myopie évolue :

- **Menicon Bloom Night™**, la première lentille d'orthokératologie agréée CE² pour le contrôle de la myopie. Le renouvellement se fait tous les 6 mois pour s'adapter au contexte d'évolution myopique de l'enfant et garantir un confort et une sécurité de port optimisés.
- **Menicon Bloom Day™** lentille souple à usage unique bénéficiant de la technologie EDoF³, approuvée CE⁴ pour le contrôle de la myopie.

Le traitement Menicon Bloom Night™ implique le port nocturne de lentilles d'orthokératologie. Conçues en matériau Z ultraperméable à l'oxygène, elles permettent aussi le remodelage cornéen (Figure 1). Celui-ci résulte d'un aplatissement de la cornée diminuant ainsi le défaut visuel. La cornée remodelée permet de rétablir une vision nette et confortable et ce, durant la journée. Cette technique ralentit la croissance physiologique de l'œil qui est intimement liée à l'évolution de la myopie. **Menicon Bloom Night™** est donc une réponse adaptée pour la correction de la myopie réfractive et pour le contrôle de la myopie lorsque le traitement est prescrit et géré par un professionnel qualifié. Au quotidien, **Menicon Bloom Care™** est une solution multifonctions spécifiquement dédiée pour faciliter l'entretien des lentilles par les enfants.


Figure 1

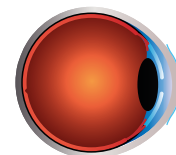

Menicon Bloom Day™ - Comment ça marche ?

Menicon Bloom Day™ utilise la technologie EDoF³. Celle-ci permet d'assurer la transition visuelle entre la zone optique centrale (qui permet une vision nette de loin) et la zone optique en périphérie. Ce changement graduel a été soigneusement conçu pour imposer un défocus myopique à la rétine en périphérie. Cela créera un stimulus pour ralentir l'élongation axiale oculaire tout en optimisant la profondeur de champs gaze d'une qualité de vision de loin préservée (Figure 2).

Figure 2

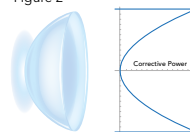

Menicon Bloom™ : Quelles implications pour les professionnels ?

Menicon introduira dans les prochains mois la démarche et les outils technologiques nécessaires auprès des prescripteurs souhaitant intégrer le concept dans leur pratique.



- **Menicon Bloom™ e-Learning** : programme de formations certifiantes pour l'adaptateur qui souhaite proposer les traitements Menicon Bloom™ à leurs jeunes porteurs.



- **Un nouvel Easyfit** : logiciel d'aide à l'adaptation, entièrement en ligne, disposant de nouvelles fonctionnalités pour mieux suivre les dossiers des porteurs Menicon Bloom™.



- **Une application mobile** : qui permettra de communiquer avec le jeune porteur (ou ses parents) sur différents aspects : suivi de l'observance, analyse de l'appréciation du porteur, questions/réponses, identification en amont possible des problèmes avec les lentilles avant le prochain rendez-vous.

Un traitement complet personnalisé selon les besoins des porteurs :

Menicon Bloom™ offre une gamme de traitements qui aide à réduire la progression de la myopie, corrigeant leur défaut visuel la journée ou la nuit.

Menicon
BLOOM NIGHT™



Menicon
BLOOM CARE™

Menicon
BLOOM DAY™



La myopie devient jour après jour, un sujet de préoccupation majeure et les solutions de traitement ne cessent de se multiplier. Menicon s'est engagé auprès des spécialistes à gérer la myopie des patients de façon unique, cohérente et sûre. Le concept **Menicon Bloom™** n'est que le début d'une ère nouvelle et d'innovations à venir.

2 Pour Menicon Bloom™ Night : marquage CE obtenu en mai 2019.

3 Extended Depth-of-Focus, technologie brevetée du Brian Holden Vision Institut.

4 Pour Menicon Bloom Day™ : marquage CE 0123 obtenu en 2019.



LA PRESBYTIE EN LENTILLES DE CONTACT

UNE DEMANDE DE LENTILLES MULTIFOCALES EN PROGRESSION

Qu'en est-il des porteurs aujourd'hui en 2020 ?

D'après une récente étude¹, plus d'1 français sur 10 portent des lentilles de contact parmi les 18-75 ans. Un usage tendanciellement supérieur auprès des femmes et des moins de 50 ans, notamment les trentenaires, tandis que les lunettes de vue sont favorisées à partir de 50 ans.



- En 2020, le nombre de presbytes porteurs de lentilles de contact a légèrement progressé sur ces trois dernières années : il est passé de 24% à 26%.
- **Une information pourtant insuffisante aujourd'hui** : si près de la moitié des porteurs de lentilles savent, comme pour les lunettes, qu'ils pourront continuer à porter des lentilles de contact pour corriger leur presbytie, 38% seulement des presbytes non porteurs de lentilles répondent en être informés³.

Connaissance des lentilles de contact pour corriger la presbytie




Rôle des professionnels de santé oculaire

Au-delà des critères d'esthétique et de praticité, les lentilles de contact répondent également à d'autres besoins tels que la qualité de vision, le confort de port et la sécurité.

Selon cette même étude d'Arcane Research, les porteurs de lentilles déclarent avoir été incités à porter des lentilles par des spécialistes de santé oculaire (49% par un ophtalmologiste, 24% par un opticien). Il va sans dire que ces professionnels restent donc les principaux relais d'informations, l'ophtalmologiste restant le principal acteur pour réaliser les essais et délivrer une ordonnance.

La moitié des porteurs déclarent avoir été incités à porter des lentilles de contact par leur ophtalmologiste, par leur opticien pour 1/4, par leur entourage ou un autre porteur de lentilles pour près de 2 sur 10.

Influenceurs du port de lentilles de contact

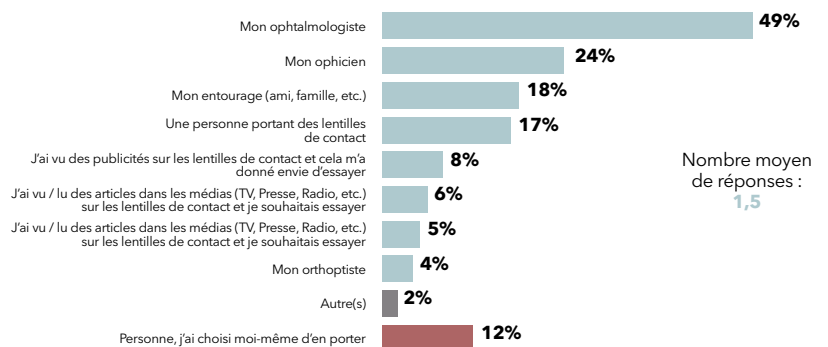

Base : 1 205 Porteurs de lentilles de contact. Q14. Qui vous a conseillé de porter des lentilles de contact ? (Plusieurs réponses possibles)

Menicon répond aux besoins des porteurs presbytes et futurs porteurs presbytes

Menicon propose une très large gamme de lentilles multifocales pour tous types de presbytes myopes, hypermétropes et /ou astigmatés et à tous les stades de leur presbytie.

- En lentilles mensuelles en silicone hydrogel, les 2 profils LOW et HIGH des lentilles Miru 1 month multifocal permettent d'adapter simplement les presbytes selon le protocole d'adaptation recommandé <https://bit.ly/2MSffKs>
- La gamme de lentilles souples personnalisées Individual complète l'offre en lentilles souples multifocales pour le plus grand nombre de porteurs presbytes.
- Le choix très large de LRPO multifocales, en matériau Z, EX ou Dk58, avec une qualité de vision inégalée et une transmissibilité à l'oxygène élevée, ouvre de nombreuses combinaisons de géométries avec VL / VP au centre et versions toriques.
- Enfin en version hybride, la gamme Duette Progressive propose aussi le choix d'un VP ou VL au centre



Gamme **Miru 1 month**
Lentilles souples mensuelles



Gammes **individual** et **Menicon Soft RX**
Lentilles souples personnalisées, trimestrielles et semestrielles



Gamme **Menicon Z Progressive**
Lentilles rigides perméables, annuelles



Gamme **Duette Progressive**
Lentilles hybrides, semestrielles

Et, poursuivant cet axe de développement, Menicon complètera son offre en presbytie avec l'arrivée prochaine de nouvelles lentilles jetables journalières multifocales, avec la technologie SMART TOUCH™...

1- Étude réalisée par Arcane Research, panel : 2060 répondants. Février 2020. 2- Étude réalisée par Arcane Research, base : 1205 porteurs de lentilles de contact. Février 2020. 3- Étude réalisée par Arcane Research : base 1 085 Porteurs de lentilles de contact hypermétrope, myope ou astigmaté / 619 non porteurs actuels de lentilles de contact ET presbytest.



ENVIRONNEMENT ET PORTEURS LRPO : DÉMATÉRIALISATION DU CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ ET NOUVELLE BOÎTE ÉCOLOGIQUE



Dans la Lettre Menicon N° 30 (2018), nous avons le plaisir de vous annoncer la création d'un nouveau coffret LRPO pour lentilles rigides perméables associé à un certificat d'authenticité, garant de l'origine et la qualité des lentilles Menicon. Aujourd'hui, les enjeux économiques et écologiques ont évolué et Menicon souhaite s'inscrire davantage dans une démarche plus « verte » et plus « numérique » avec une réponse adaptée :

- 1• **Le coffret se renouvelle** et est désormais conçu en carton recyclé, issu des sources responsables (FSC C143603).
- 2• **Le certificat d'authenticité se dématérialise** : un N° d'identification unique sera inscrit sur chaque coffret. La démarche reste inchangée : le porteur renseigne ce N° unique sur le portail prévu à cet effet, à l'adresse suivante : **www.passeportlentilles.fr**. Il accède à ses informations personnelles, aux garanties et services liés à ses lentilles ainsi qu'aux offres de renouvellement.



Menicon profite de ces évolutions pour présenter la nouvelle identité visuelle :



Menicon fait référence à un origami, hérité d'un mot japonais qui signifie littéralement « plier du papier » ou « l'art de plier du papier », afin de lui donner la forme d'un objet souhaité (animal, fleur, construction géométrique, etc...). Cela peut se traduire par une « **forme d'art visuel** ». Cet art est un passe-temps traditionnel, dans lequel nous pouvons observer l'essence même du savoir-faire japonais : le sens du détail, la méthode et la créativité.

Menicon partage cette même philosophie et met en exergue les similitudes entre cet art traditionnel et la fabrication des lentilles de contact. Mais l'analogie ne s'arrête pas là : l'objectif de Menicon n'est pas seulement de fabriquer des lentilles. Au-delà de permettre à tous les porteurs de mieux voir la beauté du monde, c'est surtout la joie procurée par cette sensation qui satisfait Menicon. De même lorsque l'on reçoit un origami...

Menicon fait référence à un origami, hérité d'un mot japonais qui signifie littéralement « plier du papier » ou « l'art de plier du papier », afin de lui donner la forme d'un objet souhaité (animal, fleur, construction géométrique, etc...). Cela



Flashez ce QR code
pour visionner
la vidéo Origami
Ou

<https://youtu.be/6NHDICT0RbI>

Menicon est également ravi de vous proposer d'aller visiter son site internet, aux nouvelles couleurs : www.menicon.fr



LA GAMME MIRU 1DAY FLAT PACK DE MENICON S'AGRANDIT :
MIRU 1DAY MENICON FLAT PACK TORIC,
NOUVELLE LENTILLE JETABLE JOURNALIÈRE POUR LES ASTIGMATES



La lentille Miru 1day Menicon Flat Pack toric vient compléter la gamme de lentilles jetables journalières SMART TOUCH™ de Menicon. Bénéficiant de la technologie SMART TOUCH™ : c'est la garantie d'une lentille toujours dans le bon sens de la pose lors de l'ouverture du blister, une facilité de manipulation permettant ainsi au porteur de ne toucher que la surface externe de la lentille, réduisant dès lors les risques de contamination bactérienne.



SMART TOUCH™

Un packaging plus sécuritaire spécialement conçu pour un usage unique.

LA TECHNOLOGIE SMART FIT : UNE GÉOMÉTRIE TORIQUE TRÈS FINE BI-ASPHERIQUE

La géométrie torique est dotée d'un double allègement vertical offrant ainsi une très bonne stabilité et un bon centrage de la lentille sur l'œil. La géométrie bi-aspérique génère des aberrations sphériques méridionales et longitudinales qui permettent de maintenir une bonne qualité visuelle en cas de légère rotation.


Ce système de stabilisation dynamique s'adapte à l'anatomie palpébrale afin d'offrir à la fois un confort optimal et une excellente stabilité.



Le concept Smart Fit oriente naturellement la lentille dans le bon sens quelque soit la façon dont elle est posée.



La nouvelle géométrie torique respecte l'asymétrie palpébrale avec une épaisseur minimisée pour optimiser le confort.

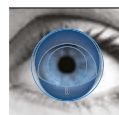

Le double allègement vertical offre stabilité et centrage, garants d'une vision nette et stable.

LA LENTILLE QUI SE PRÉOCCUPE DE L'ENVIRONNEMENT

Les lentilles de la gamme Miru 1day Menicon Flat Pack consomment moins de matériau lors de leur fabrication, utilisent du plastique recyclé, génèrent moins de déchets et leur emballage est recyclable.

Représente seulement 20% du volume de déchets générés par les blisters traditionnels en 1 an.



Les boîtes de lentilles sont également conçues en plastique recyclé, à partir des moules de fabrication.



Caractéristiques du produit :

Caractéristiques	Matériau	poly HEMA-GMA. USAN : hioxifilcon A (hydrogel)
	Teneur en eau	57%
	Teinte de manipulation	Bleu clair
	Géométrie	Design Bi-aspérique
	Fabrication	Technologie CENTRAFORM™
Gamme de paramètres	r _c	8,6mm
	Diamètre	14,5mm
	Épaisseur au centre @ -3,00D	0,1mm
	Sphères	Plan à -6,00 D (par 0,25 D) -6,50D à -10,00D (par 0,50D)
	Cylindres	-0,75 D, -1,25 D et -1,75 D*
	Axes	15°, 90°, 165° et 180°
Port	Modalité de port	journalier (usage unique)
	Renouvellement	Lentille jetable journalière

Simplifiez l'adaptation - Découvrez notre Calculateur toric en ligne : <https://toric.meniconcalculator.com/fr/calculateur-lentilles-souples-toriques-fr/>

Extension de gamme Miru 1 month toric

Nouveau pour la lentille mensuelle torique :

A compter de Juin 2020, le cylindre -2.25 D sera désormais disponible pour la lentille **Miru 1 month toric**.

Pour rappel, la gamme s'étend de :

- +4.00 D à -6.00 D (par 0.25) et de -6.50 D à -10.00 D (0.50)
- Cylindres :
-0.75D, -1.25D, -1.75D : tous les axes par 10° de 0° à 180°
-2.25D : axes 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°

*Le cylindre -1.75 est disponible uniquement pour l'axe 180°



MENICARE SOFT : LA SOLUTION MULTIFONCTIONS POUR TOUTES LES LENTILLES SOUPLES AU NOUVEAU PACKAGING ET AUX NOUVEAUX FORMATS

Selon la dernière étude de contactologie d'Arcane Research (Février 2020), en France, 6 porteurs de lentilles de contact sur 10 utilisent des lentilles mensuelles ou bimensuelles. L'utilisation d'une solution d'entretien pour lentilles souples est indispensable quotidiennement pour ces porteurs. La formulation de la solution MENICARE SOFT permet le nettoyage, la décontamination, le rinçage et la conservation des lentilles et optimise le confort du porteur. De plus, certaines caractéristiques non relatives à la performance peuvent aussi améliorer l'expérience du porteur, telles que la praticité et le volume du flacon. Menicon renouvelle le packaging et les formats de conditionnement du MENICARE SOFT, solution multifonctions hautement performante pour toutes les lentilles souples. MENICARE SOFT est désormais disponible en flacons de 70 ML, 250 ML et 360 ML. Cela offre un plus grand choix pour répondre au mieux aux besoins des différents types de porteurs. Menicon propose aussi, pour chaque format, un conditionnement en pack.



Un label Made in France

Le nouveau MENICARE SOFT est labelisé **Made In France**. En effet, le produit est entièrement fabriqué par Menicon Pharma SAS, filiale de Menicon SAS et usine 100% française situé à Illkirch-Graffenstaden (proche de Strasbourg).

MENICARE SOFT est un dispositif médical de classe IIb portant le marquage CE 0483.

MENICON PHARMA



L'étude de Morgan PB montre que 42% de porteurs gardent la solution 3 mois après ouverture. Les nouveaux formats de MENICARE SOFT permettent de choisir le volume de la solution en fonction du besoin réel de chaque porteur, et réduisent ainsi le risque de prolonger l'utilisation au-delà de 3 mois après l'ouverture. Le grand format de 360 ml reste un choix classique pour les porteurs qui portent des lentilles de façon régulière. Le format 250 ml représente la consommation moyenne pour une utilisation quotidienne pendant un mois. C'est idéal pour les utilisations moins fréquentes. Le format 70 ml accompagne aisément les porteurs en voyage ou séjour court.

Praticité & Hygiène

Le nouveau flacon MENICARE SOFT respecte l'ergonomie de la main et facilite au quotidien la manipulation par les porteurs. Pour ouvrir le flacon la 1^{ère} fois, il faut tourner le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre. A chaque utilisation, le bouchon s'ouvre

avec une simple poussée du pouce vers le haut, ce qui minimise le risque de contamination. Le flacon est issu d'un processus de fabrication optimisé, qui réduit la quantité de plastique utilisé, et délivre un flacon résistant, souple et agréable à tenir.



Efficacité, Sécurité & Confort

MENICARE SOFT est une référence en solution d'entretien multifonctions. La solution est un équilibre parfait entre l'efficacité décontaminante et le respect des cellules cornéennes. Elle atteint le critère primaire anti-bactérienne et anti-fongique d'ISO 14729 en 20 minutes, est efficace contre les formes amibiennes à la fois trophozoïtes et kystes ; et son taux d'élimination du virus est de 99,99% à 99,999%. Elle élimine par dissolution les lipides présents

sur la lentille par son tensioactif d'origine naturelle très doux. Dotée de la technologie COMFORTEC qui associe quatre composants complémentaires, elle prévient la dénaturation et l'adhésion de protéines sur la lentille, deux facteurs impliqués dans l'inflammation oculaire et l'intolérance aux lentilles. Le temps de trempage nécessaire est seulement de quatre heures.



Conseils d'hygiène en période de COVID

POUR LES PROFESSIONNELS

RAPPEL D'ENTRETIEN DES LENTILLES D'ESSAI RIGIDES PERMÉABLES AVEC MENILAB :

Dans le contexte actuel, l'hygiène et la sécurité sont au cœur des débats. Le lavage des mains avant toute manipulation ainsi que l'entretien des lentilles sont plus importants que jamais. Pour l'entretien des boîtes de lentilles d'essai rigides perméables, l'usage de l'**hypochlorite de sodium** (présent dans la formulation chimique du **MeniLab**) est recommandé pour son action antivirale. Pour en savoir plus, télécharger la Brochure MeniLAB : <https://bit.ly/2XMUiH2> ou flashez le QR code à droite. Et consulter le communiqué MeniLAB - Progent : <https://bit.ly/2Betl0x>



POUR LES PORTEURS

LE RÔLE DU MASSAGE ET DU RINÇAGE EST ESSENTIEL DANS LA DÉCONTAMINATION.



1
Avant toute manipulation des lentilles, le lavage et séchage complet des mains est obligatoire pour garantir une parfaite hygiène.



2
Après le retrait des lentilles, procéder à un massage soigneux et délicat des lentilles dans la paume de la main. C'est la clé d'un nettoyage réussi !



3
Pour terminer, rincer les lentilles avec votre solution d'entretien et les placer dans l'étui, rempli de nouvelle solution, pour parfaire la décontamination en respectant le temps de port recommandé.

Toutes nos vidéos sont disponibles et téléchargeables sur menicon.fr et le site grand public www.passeportlentilles.fr

ACTION ANTIVIRALE DU PROGENT.

Pour les porteurs de LRPO, le traitement Progent hebdomadaire à base d'hypochlorite* à 0,2% apporte une garantie supplémentaire compte tenu de son activité antivirale.



Formez-vous à distance !

Tous nos e-learning
disponibles sur

campusmenicon.fr

La vocation du campus menicon est de former tous les professionnels de la contactologie.

Le site internet vous propose toute l'actualité des produits et des formations, qu'elles soient sur le campus, à distance ou en e-learning.

Suivez-nous en vous inscrivant à la newsletter sur campusmenicon.fr



NOS COORDONNÉES

Services Clients : Tél. : 01 85 73 13 11 / Fax : 01 85 73 13 97 serviceclients@menicon.fr

Assistance Technique : Tél. : 01 85 73 13 12 atechnique@menicon.fr

Formation Menicon : campus@menicon.fr

Menicon SAS

Paris Nord 2 - 13 rue de la perdrix
CS 20061 Villepinte - 95926 Roissy Charles-de-Gaulle cedex

